

# Ведро-диспенсер для салфеток

Диспенсер рассчитан на возможность его многоразового использования, меняя блоки с рулонами полотенец.

Диспенсер изготовлен из прочного высококачественного пластика, который устойчив к воздействию различных кислот, растворов и других агрессивных жидкостей.

Диспенсер предназначен в качестве вспомогательного оборудования при дезинфекции и мытье различных поверхностей в помещениях, мебели, предметов обстановки, аппаратуры, оборудования всех видов и назначения и других объектов, подлежащих обработке способом протирания.

## Область применения:

Лечебно-профилактические, стоматологические, фармацевтические, аптечные и другие учреждения здравоохранения, инфекционные очаги, объекты социально-культурного, коммунально-бытового, спортивно-оздоровительного назначения (включая фитнес центры, бассейны, аквапарки, бани, сауны и др.), предприятия индустрии красоты (парикмахерские, салоны красоты и др.), детские дошкольные, образовательные, социальные и пенитенциарные учреждения, все виды транспорта, предприятия общественного питания и торговли, рынки, производственные и другие объекты.

## Инструкция по применению:

- Вскрыть емкость-диспенсер.
- Вставить рулон салфеток, предварительно вынув шпулю.
- Рулон полотенец равномерно залить предварительно приготовленным рабочим раствором дезинфицирующего или моющего средства необходимой концентрации (согласно инструкции на данное средство) или готовым дезинфицирующим средством. Для полного пропитывания рулона необходимо залить такое количество средства, чтобы полотенца полностью пропитались и небольшое количество раствора ещё осталось на дне емкости-диспенсера.
- Закрыть емкость-диспенсер и оставить на 15-30 минут для полного пропитывания рулона.
- Открыть крышку емкости-диспенсера и протянуть через прорезь в крышке одно полотенце из центра рулона. Плотнo закрыть крышку емкости-диспенсера и крышку дозирующего клапана. Диспенсерная система готова к использованию.

Срок использования пропитанного рулона полотенец должен соответствовать сроку годности используемого рабочего раствора дезинфицирующего средства, указанного в инструкции по его применению. Транспортировать и хранить при температуре от -30 °С до + 30 °С.